

Fig. 1



Fig. 2


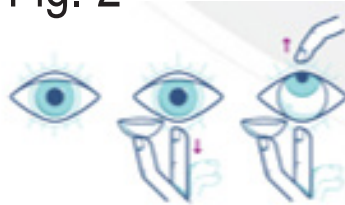


Fig. 3



Fig. 4

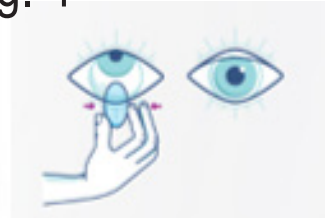

# ACUVUE®



**USA:** Johnson & Johnson Vision Care, Inc.,  
7500 Centurion Parkway,  
Jacksonville, Florida, 32256, USA



**IRELAND:** Johnson & Johnson Vision Care  
Ireland UC, The National Technology Park,  
Limerick, Ireland



AMO Ireland, Block B, Liffey Valley Office  
Campus, Quarryvale, Co. Dublin, Ireland  
[www.acuvue.com](http://www.acuvue.com)



Johnson & Johnson AG, Gubelstrasse  
34, 6300 Zug, Switzerland

# CE

2797

## NL Gebruiksaanwijzing voor ACUVUE daglenzen voor eenmalig gebruik

LEES DIT INSTRUCTIEBOEKJE ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR HET VOOR LATER GEBRUIK. ACUVUE CONTACTLENZEN (CL) ZIJN MEDISCHE HULPMIDDELEN EN DIENEN DOOR EEN OOGZORGSPESIALIST TE WORDEN AANGEMETEN. VOLG TE ALLEN TIJDE DE AANWIJZINGEN VAN UW OOGZORGSPESIALIST EN DE INSTRUCTIES IN DEZE FOLDER.

### PRODUCTBESCHRIJVING en BEOOGD GEBRUIK:

Mogelijk zijn niet alle vermelde producten in uw land verkrijgbaar.

**ACUVUE OASYS met HydraLuxe technologie Contactlenzen; ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM met HydraLuxe technologie Contactlenzen; ACUVUE OASYS MAX 1-Day Contactlenzen; ACUVUE OASYS MAX 1-Day for ASTIGMATISM Contactlenzen, ACUVUE OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL Contactlenzen, ACUVUE OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL for ASTIGMATISM Contactlenzen**

**Verpakkingsvloeistof:** Borate gebufferde zoutoplossing met methylcellulose.

**Materiaal:** senofilcon A

**1-DAY ACUVUE MOIST Contactlenzen; 1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM Contactlenzen; 1-DAY ACUVUE MOIST MULTIFOCAL Contactlenzen**

**Verpakkingsvloeistof:** Borate gebufferde zoutoplossing met povidon.

**Materiaal:** etafilcon A

Boraten (boorzuur en natriumboraat) worden in een concentratie boven 0,1% w/w als CMR 1B-stoffen gedefinieerd en zijn veilig als het product conform de instructies op het etiket wordt gebruikt.

ACUVUE daglenzen voor eenmalig gebruik zijn bedoeld om < 24 uur te worden gedragen terwijl u wakker bent. Uw oogzorgspecialist moet de lenzen voorschrijven en een draagschema opstellen. Uw lenzen hoeven niet te worden gereinigd of gedesinfecteerd en moeten na gebruik worden weggegooid.

- ACUVUE sferische contactlenzen voor eenmalig gebruik zijn bedoeld voor dagelijks gebruik voor de optische correctie van myopie (bijziendheid) en hypermetropie (verziendheid) bij personen met gezonde ogen met astigmatisme van 1,00 dioptrie of minder.
- ACUVUE for ASTIGMATISM contactlenzen voor eenmalig gebruik zijn bedoeld voor dagelijks gebruik voor de optische correctie van myopie (bijziendheid) en hypermetropie (verziendheid) bij personen met gezonde ogen en astigmatisme.
- ACUVUE for PRESBYOPIA contactlenzen voor eenmalig gebruik zijn bedoeld voor dagelijks gebruik en voor de optische correctie van myopie (bijziendheid) en hypermetropie (verziendheid) van presbyope mensen met gezonde ogen en een astigmatisme van 0,75 dioptrie of minder.
- ACUVUE for PRESBYOPIA and ASTIGMATISM contactlenzen voor eenmalig gebruik zijn bedoeld voor dagelijks gebruik en voor de optische correctie van myopie (bijziendheid) en hypermetropie (verziendheid) bij presbyope mensen met gezonde ogen en een astigmatisme tussen 0,75 dpt en 1,75 dioptrie.

### WAARSCHUWING:

UV-absorberende CL zijn geen vervanging voor UV-bescherming. U moet een UV-beschermende bril blijven dragen zoals aangegeven.

### CONTRA-INDICATIES:

Bij het dragen van CL ter verbetering van het gezichtsvermogen, mag u GEEN CL gebruiken in het geval van ziektes, letsel, ontstekingen, infecties of afwijkingen aan de ogen.

- Een aandoening of ziekte aan het oog of het omliggende weefsel kan door het dragen van CL of het gebruiken van CL-oplossingen worden veroorzaakt of verergerd.
- Als de ogen rood worden of geïrriteerd raken: Sommige mensen kunnen een allergische reactie ontwikkelen als gevolg van de chemicaliën of conserveringsmiddelen in oplossingen voor contactlenzen.

### WAARSCHUWINGEN:

Het niet opvolgen van deze waarschuwingen kan leiden tot ernstige infectie, vermindering van gezichtsvermogen of blindheid. OOGPROBLEMEN, (MET INBEGRIJP VAN HOORNVLIESONTSTEEKING), KUNNEN ZICH IN RAP TEMPO ONTWIKKELEN EN KUNNEN LEIDEN TOT VERMINDERING VAN HET GEZICHTSVERMOGEN. INDIEN U EEN VAN DE VOLGENDE SYMPTOMEN (ongemak aan het oog, vermindering van het gezichtsvermogen, veranderingen in het gezichtsvermogen, overmatige traanvorming,

roodheid van het oog) OPTREEDT MOET U DE LENZEN DIRECT UITNEMEN EN ONMIDDELIJK CONTACT OPNEMEN MET UW OOGZORGSPESIALIST.

- Draag geen CL in het geval van een ziekte aan het oog.
- DRAAG UW CL NIET TIJDENS HET SLAPEN.
- STEL DE CL NIET BLOOT AAN WATER, DAT KAN LEIDEN TOT EEN SERIEUZE INFECTIE. CL die zijn blootgesteld aan water moeten weggegooid en vervangen worden (draag geen CL tijdens watersporten).
- Spoel uw lenzen NOOIT af met kraanwater.

### VOORZORGSMATREGELEN:

NIET GEBRUIKEN ALS DE STERIELE BLISTERVERPAKKING IS GEOPEND OF BESCHADIGD, OF ALS DE HOUDBAARHEIDSDATUM IS VERSTREKEN.

- Draag alleen uw eigen voorgeschreven CL. Verander niet van lenstype of -parameters zonder eerst uw Oogzorgspecialist om advies te vragen. Vraag uw oogzorgspecialist naar het schema voor vervolgafspraken.
- NEEM ALTIJD EERST CONTACT OP MET DE OOGZORGSPESIALIST VOORDAT U EEN OOGMEDICIJN GEBRUIKT.
- Gebruik NOOIT een pincet of andere hulpmiddelen om uw lenzen uit de verpakking te halen.
- Roken en/of het nemen van medicijnen (zoals anticonceptie of andere medicijnen) kunnen problemen aan het oog verergeren of zorgen voor discomfort.
- VERMIJD alle schadelijke of irriterende dampen. Houd uw ogen gesloten als u spuitbussen gebruikt.

### BIJWERKINGEN:

Brandende, prikkende, jeukende en/of droge ogen - Ongemakkelijk aanvoelende lenzen of het gevoel dat er iets in uw oog zit - Zwelling of ontsteking in of rondom de ogen - Roodheid van het oog - Ooglidproblemen - Waterige ogen en/of ongewone afscheiding uit het oog - Slecht of wazig zicht - Regenbogen of lichtkransen rondom objecten - Gevoeligheid voor licht - Tijdelijke problemen als gevolg van perifere infiltraten, perifere cornea-ulcers en cornea-erosie. Indien u een probleem ondervindt, dient u UW CL ONMIDDELIJK UIT TE NEMEN en contact op te nemen met uw oogzorgspecialist.

### GEBRUIKSAANWIJZING:

Het niet opvolgen van de instructies kan ernstige problemen aan het oog veroorzaken.

- WAS ALTIJD UW HANDEN VOORDAT U UW CL AANRAAKT: CL zijn erg gevoelig voor vervuiling.
- GEBRUIK GEEN SPEEKSEL EN DOE UW LENZEN NIET IN UW MOND.
- LAAT NOOIT IEMAND ANDERS UW LENZEN DRAGEN.
- Volg de instructies op van uw oogzorgspecialist betreffende het dragen en uitnemen van uw CL.

### Lensverpakking:

Open de lensverpakking voorzichtig om de lens bloot te leggen.

### Inzetten van de lens:

Zorg ervoor dat de lens niet binnenstebuiten zit. Plaats de contactlens op uw wijsvinger om de vorm te verifiëren. De lens zou een natuurlijke, afgeronde, schaalvormige vorm moeten aannemen (Afb. 1). Terwijl de lens op uw wijsvinger ligt, houdt u uw bovenste ooglid met uw andere hand vast om te voorkomen dat u gaat knippen. Plaats de lens op uw oog. (Afb. 2 & 3).

### Uithalen van de lens:

Kijk omhoog en schuif de lens met uw wijsvinger omlaag naar het witte deel van uw oog. Pak de lens voorzichtig vast tussen duim en wijsvinger en verwijder de lens. (Afb. 4)

### NOODGEVALLEN:

Als er chemicaliën in uw ogen terechtkomen (huishoudelijke producten, tuinmiddelen, laboratoriumchemicaliën, enzovoort): SPOEL DE OGEN

ONMIDDELIJK UIT MET KRAANWATER EN NEEM ONMIDDELIJK CONTACT OP MET UW OOGZORGSPESIALIST OF GA NAAR DE EERSTE HULP VAN HET DICTSTBIJZIJNDE ZIEKENHUIS.

#### BIJWERKINGEN RAPPORTEREN:

Meld incidenten die zich voordoen tijdens het dragen van ACUVUE CL altijd aan de fabrikant en/of gemachtigde vertegenwoordiger en/of de autoriteit in uw land.

#### Symbool/titel (uitleg):

| Symbool        | Definitie                                                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Let op, raadpleeg instructieboekje                                                                                                                                      |
|                | Producent                                                                                                                                                               |
|                | Productiedatum                                                                                                                                                          |
|                | Vervaldatum (uiterste gebruiksdatum)                                                                                                                                    |
|                | Lotnummer                                                                                                                                                               |
|                | Gesteriliseerd d.m.v. stoom of hitte                                                                                                                                    |
|                | Niet hergebruiken (eenmalig gebruik)                                                                                                                                    |
|                | Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is                                                                                                                          |
|                | Verwijderingsbijdrage                                                                                                                                                   |
|                | Medisch hulpmiddel in de Europese Gemeenschap                                                                                                                           |
|                | Geeft een systeem met een enkelvoudige steriele barrière aan                                                                                                            |
|                | LET OP: Federale wetten in de V.S. bepalen dat dit product uitsluitend mag worden verkocht door of op verzoek van een gediplomeerd contactlensspecialist of optometrist |
|                | UV-filter                                                                                                                                                               |
|                | Geautoriseerd vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap                                                                                                              |
|                | Gevolmachtigd vertegenwoordiger in Zwitserland (CH)                                                                                                                     |
|                | CE-markering en identificatienummer van de aangemelde instantie                                                                                                         |
| <b>DIA</b>     | Diameter                                                                                                                                                                |
| <b>BC</b>      | Basiskromming                                                                                                                                                           |
| <b>D</b>       | Dioptrie (lenssterkte)                                                                                                                                                  |
| <b>CYL</b>     | Cilindersterkte                                                                                                                                                         |
| <b>AXIS</b>    | As                                                                                                                                                                      |
| <b>MAX ADD</b> | Hoogste nabij additie welke kan worden gecorrigeerd                                                                                                                     |
| <b>LOW / L</b> | "Low" nabij additie                                                                                                                                                     |
| <b>MID / M</b> | "Medium" nabij additie                                                                                                                                                  |
| <b>HGH / H</b> | "High" nabij additie                                                                                                                                                    |
|                | Juiste lensoriëntatie                                                                                                                                                   |
|                | Onjuiste lensoriëntatie (binnenstebuiten)                                                                                                                               |
|                | Aanduiding voor houders en verpakkingen van papier                                                                                                                      |
|                | Aanduiding voor samengestelde materialen                                                                                                                                |
|                | Verpakking openen                                                                                                                                                       |
|                | Bevat schadelijke stoffen                                                                                                                                               |
|                | Importeur in de Europese Gemeenschap                                                                                                                                    |