

Fig. 1



Fig. 2


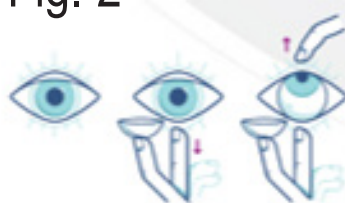


Fig. 3



Fig. 4

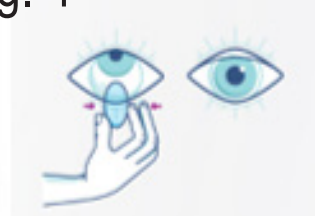

# ACUVUE®



**USA:** Johnson & Johnson Vision Care, Inc.,  
7500 Centurion Parkway,  
Jacksonville, Florida, 32256, USA



**IRELAND:** Johnson & Johnson Vision Care  
Ireland UC, The National Technology Park,  
Limerick, Ireland



AMO Ireland, Block B, Liffey Valley Office  
Campus, Quarryvale, Co. Dublin, Ireland  
[www.acuvue.com](http://www.acuvue.com)



Johnson & Johnson AG, Gubelstrasse  
34, 6300 Zug, Switzerland

CE  
2797

LEES DIT INSTRUCTIEBOEKJE ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR HET VOOR LATER GEBRUIK. ACUVUE CONTACTLENZEN (CL) ZIJN MEDISCHE HULPMIDDELEN EN DIENEN DOOR EEN OOGZORGSPESIALIST TE WORDEN AANGEMETEN. VOLG TE ALLEN TIJDE DE AANWIJZINGEN VAN UW OOGZORGSPESIALIST EN DE INSTRUCTIES IN DEZE FOLDER.

### **PRODUCTBESCHRIJVING en BEOOGD GEBRUIK:**

De ACUVUE OASYS met HYDRACLEAR PLUS technologie zijn bestemd voor de optische correctie van myopie (bijziendheid) en hypermetropie (verziendheid) bij personen met gezonde ogen met astigmatisme van 1,00 dioptrie of minder. De lenzen zijn ook geschikt voor gebruik als bandagelens bij bepaalde optische aandoeningen en het verlichten van discomfort op het hoornvlies. Uw oogzorgspecialist zal u informeren bij een dergelijke aandoening en u zo nodig medicatie voorschrijven of een specifiek vervangschema voorstellen. Het gebruik als verbandlens moet zorgvuldig worden gecontroleerd door uw oogzorgspecialist. Indien opgedragen zal alleen de oogzorgspecialist de CL inzetten en uithalen. Probeer niet zelf een aandoening te behandelen met een CL of oogmedicatie toe te dienen zonder eerst uw oogzorgspecialist om advies te vragen.

Senofilcon A contactlenzen (38% H<sub>2</sub>O) in borate gebufferde zoutoplossing met methylethercellulose: Bedoeld voor dagelijks gebruik (14 dagen - Regelmatige vervanging) (minder dan 24 uur, terwijl u wakker bent) of doorlopend gebruik (mag tot 7 dagen en 6 nachten gebruikt worden en weggegooid worden na uitname) (meer dan 24 uur, inclusief slaap). Als u uw lenzen gebruikt voor doorlopend gebruik, hoeft u de lenzen niet te reinigen of desinfecteren. Uw oogzorgspecialist stelt een draagschema en vervangingsschema voor u op. Boraten (boorzuur en natriumboraat) worden in een concentratie boven 0,1% w/w als CMR 1B-stoffen gedefinieerd en zijn veilig als het product conform de instructies op het etiket wordt gebruikt.

### **WAARSCHUWING:**

UV-absorberende CL zijn geen vervanging voor UV-bescherming. U moet een UV-beschermende bril blijven dragen zoals aangegeven.

### **CONTRA-INDICATIES:**

Bij het dragen van CL ter verbetering van het gezichtsvermogen, mag u GEEN CL gebruiken in het geval van ziektes, letsel, ontstekingen, infecties of afwijkingen aan de ogen.

- Een aandoening of ziekte aan het oog of het omliggende weefsel kan door het dragen van CL of het gebruiken van CL-oplossingen worden veroorzaakt of verergerd.
- Als de ogen rood worden of geïrriteerd raken: Sommige mensen kunnen een allergische reactie ontwikkelen als gevolg van de chemicaliën of conserveringsmiddelen in oplossingen voor contactlenzen.

### **WAARSCHUWINGEN:**

Het niet opvolgen van deze waarschuwingen kan leiden tot ernstige infectie, vermindering van gezichtsvermogen of blindheid. OOGPROBLEMEN, (MET INBEGRIJ VAN HOORNVLIESONTSTEEKING), KUNNEN ZICH IN RAP TEMPO ONTWIKKELEN EN KUNNEN LEIDEN TOT VERMINDERING VAN HET GEZICHTSVERMOGEN. INDIEN U EEN VAN DE VOLGENDE SYMPTOMEN (oogongemak, vermindering van het gezichtsvermogen, veranderingen in het gezichtsvermogen, overmatige traanvorming, roodheid van het oog) OPTREEDT MOET U DE LENZEN DIRECT UITNEMEN EN ONMIDDELIJK CONTACT OPNEMEN MET UW OOGZORGSPESIALIST.

- Draag geen CL in het geval van een ziekte aan het oog.
- Draag geen CL wanneer u slaapt tenzij uw oogzorgspecialist u CL voor doorlopend gebruik (7 dagen/6 nachten) heeft voorgeschreven.
- STEL DE CL NIET BLOOT AAN WATER, DAT KAN LEIDEN TOT EEN SERIEUZE INFECTIE. CL die zijn blootgesteld aan water moeten weggegooid en vervangen (draag geen CL tijdens watersporten).
- DESINFECTEER OF REINIG UW CL NOOIT MET WATER, ZOUTOPLOSSING OF BEVOCHTIGINGSDRUPPELS.

### **VOORZORGSMAATREGELEN:**

NIET GEBRUIKEN ALS DE STERIELE BLISTERVERPAKKING IS GEOPEND OF BESCHADIGD, OF ALS DE HOUDBAARHEIDSDATUM IS VERSTREKEN.

- Draag alleen uw eigen voorgeschreven CL. Verander niet van lenstype of -parameters zonder eerst uw Oogzorgspecialist om advies te vragen. Vraag uw oogzorgspecialist naar het schema voor vervolgafspraken.
- NEEM ALTIJD EERST CONTACT OP MET DE OOGZORGSPESIALIST VOORDAT U EEN OOGMEDICIJN GEBRUIKT.
- Gebruik NOOIT een pincet of andere hulpmiddelen om uw lenzen uit de verpakking te halen.
- Roken en/of het nemen van medicijnen (zoals anticonceptie of andere medicijnen) kunnen problemen aan het oog verergeren of zorgen voor discomfort.
- VERMIJD alle schadelijke of irriterende dampen. Houd uw ogen gesloten als u spuitbussen gebruikt.

### **BIJWERKINGEN:**

Brandende, prikkende, jeukende en/of droge ogen - Ongemakkelijk aanvoelende lenzen of het gevoel dat er iets in uw oog zit - Zwelling of ontsteking in of rondom de ogen - Roodheid van het oog - Ooglidproblemen - Waterige ogen en/of ongewone afscheiding uit het oog - Slecht of wazig zicht - Regenbogen of lichtkransen rondom objecten - Gevoeligheid voor licht - Tijdelijke problemen als gevolg van perifere infiltraten, perifere cornea-ulcers en cornea-erosie. Indien u een probleem ondervindt, dient u UW CL ONMIDDELIJK UIT TE NEMEN en contact op te nemen met uw oogzorgspecialist.

### **GEBRUIKSAANWIJZING:**

Het niet opvolgen van de instructies kan ernstige problemen aan het oog veroorzaken.

- WAS ALTIJD UW HANDEN VOORDAT U UW CL AANRAAKT: CL zijn erg gevoelig voor vervuiling.
- GEBRUIK GEEN SPEEKSEL EN DOE UW LENZEN NIET IN UW MOND.
- LAAT NOOIT IEMAND ANDERS UW LENZEN DRAGEN.
- Volg de instructies van uw oogzorgspecialist betreffende het dragen, uithalen, opbergen en het onderhouden van de houder.

### **Lensverpakking:**

Open de lensverpakking voorzichtig om de lens bloot te leggen.

### **Inzetten van de lens:**

Zorg ervoor dat de lens niet binnenstebuiten zit. Plaats de contactlens op uw wijsvinger om de vorm te verifiëren. De lens zou een natuurlijke, afgeronde, schaalvormige vorm moeten aannemen (Afb. 1). Terwijl de lens op uw wijsvinger ligt, houdt u uw bovenste ooglid met uw andere hand vast om te voorkomen dat u gaat knippen. Plaats de lens op uw oog. (Afb. 2 & 3).

**Lensuitname:** Kijk omhoog en schuif de lens met uw wijsvinger omlaag naar het witte deel van uw oog. Pak de lens voorzichtig vast tussen duim en wijsvinger en verwijder de lens. (Afb. 4)

**Onderhouden van de CL:** GEBRUIK ALLEEN AANBEVOLEN VLOEISTOFFEN VOOR HET REINIGEN, DESINFECTEREN EN OPBERGEN VAN UW CL en volg de bijgeleverde instructies. U mag de desinfectievloeistof en CL NIET VERHITTEN. Houd de CL altijd volledig ondergedompeld met desinfectievloeistof wanneer het in een gesloten houder wordt bewaard. Als de CL is uitgedroogd, gooi het dan weg en vervang deze. Leeg/reinig en spoel de lenshouder altijd met verse, steriele desinfectievloeistof en veeg schoon met een droge doek. Vervang de Clhouder volgens de instructies om microbiële groei tegen te gaan. Gebruik bij een waterstofperoxide onderhoudsysteem ALLEEN de bijgeleverde lenshouder. Het niet neutraliseren van de waterstofperoxide kan ernstig prikkende, brandende en beschadigde ogen tot gevolg hebben.

**NOODGEVALLEN:** Als er chemicaliën in uw ogen terechtkomen (huishoudelijke producten, tuinmiddelen, laboratoriumchemicaliën, enzovoort): SPOEL DE OGEN ONMIDDELIJK UIT MET KRAANWATER EN NEEM ONMIDDELIJK CONTACT OP MET UW OOGZORGSPESIALIST OF GA NAAR DE EERSTE HULP VAN HET DICTSTBIJZIJNDE ZIEKENHUIS.

#### BIJWERKINGEN RAPPORTEREN:

Meld incidenten die zich voordoen tijdens het dragen van ACUVUE CL altijd aan de fabrikant en/of gemachtigde vertegenwoordiger en/of de autoriteit in uw land.

#### Symbool/titel (uitleg):

| Symbool | Definitie                                                                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Let op, raadpleeg instructieboekje                                                                                                                                      |
|         | Producent                                                                                                                                                               |
|         | Productiedatum                                                                                                                                                          |
|         | Vervaldatum (uiterste gebruiksdatum)                                                                                                                                    |
|         | Lotnummer                                                                                                                                                               |
|         | Gesteriliseerd d.m.v. stoom of hitte                                                                                                                                    |
|         | Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is                                                                                                                          |
|         | Verwijderingsbijdrage                                                                                                                                                   |
|         | Medisch hulpmiddel in de Europese Gemeenschap                                                                                                                           |
|         | Geeft een systeem met een enkelvoudige steriele barrière aan                                                                                                            |
|         | LET OP: Federale wetten in de V.S. bepalen dat dit product uitsluitend mag worden verkocht door of op verzoek van een gediplomeerd contactlensspecialist of optometrist |
|         | UV-filter                                                                                                                                                               |
|         | Geautoriseerd vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap                                                                                                              |
|         | Gevolmachtigd vertegenwoordiger in Zwitserland (CH)                                                                                                                     |
|         | CE-markering en identificatienummer van de aangemelde instantie                                                                                                         |
|         | Diameter                                                                                                                                                                |
|         | Basiskromming                                                                                                                                                           |
|         | Dioptrie (lenssterkte)                                                                                                                                                  |
|         | Cilindersterkte                                                                                                                                                         |
|         | As                                                                                                                                                                      |
|         | Hoogste nabij additie welke kan worden gecorrigeerd                                                                                                                     |
|         | "Low" nabij additie                                                                                                                                                     |
|         | "Medium" nabij additie                                                                                                                                                  |
|         | "High" nabij additie                                                                                                                                                    |
|         | Juiste lensoriëntatie                                                                                                                                                   |
|         | Onjuiste lensoriëntatie (binnenstebuiten)                                                                                                                               |
|         | Aanduiding voor houders en verpakkingen van papier                                                                                                                      |
|         | Aanduiding voor samengestelde materialen                                                                                                                                |
|         | Bevat schadelijke stoffen                                                                                                                                               |
|         | Importeur in de Europese Gemeenschap                                                                                                                                    |