

**Belangrijk – Lees deze bijsluiter aandachtig door en bewaar deze als naslagwerk voor later gebruik.**

**BEOOGD DOEL:** Reinigt, spoelt, desinfecteert, bewaart, verwijdert aanslag op het oppervlak, inclusief lipiden en eiwitten, en herbevochtigt zachte (hydrofiele) contactlenzen.

**BEOOGDE GEBRUIKERS:** ACUVUE™ RevitaLens desinfecterende all-in-one contactlensvloeistof is bedoeld voor gebruik door dragers van zachte (hydrofiele) contactlenzen (ook met lenshouders).

**INDICATIES:** ACUVUE™ RevitaLens desinfecterende all-in-one contactlensvloeistof reinigt, spoelt, desinfecteert, bewaart, verwijdert aanslag op het oppervlak, inclusief lipiden en eiwitten, en herbevochtigt zachte (hydrofiele) contactlenzen.

**CONTRA-INDICATIES:** Niet bekend.

**KLINISCHE VOORDELEN:** Reiniging en desinfectie van contactlenzen. Zorgt voor langdurig draagcomfort bij het dragen van contactlenzen.

Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, waren niet opgenomen in de uitgevoerde klinische studie(s).

#### AANWIJZINGEN VOOR HET DESINFECTEREN VAN CONTACTLENZEN:

1. Was uw handen met zeep en warm water en droog ze af met een pluisvrije handdoek voordat u de lenzen en/of de lenshouder hanteert, om de kans op infectie te verkleinen.
2. Na het uithalen van uw contactlenzen, reinigt en desinfecteert u uw lenzen door 3 of meer druppels van de vloeistof op één zijde van het lensoppervlak aan te brengen.
3. WRIJF de lens voorzichtig in een niet-cirkelvormige beweging van het midden naar de randen gedurende 2 tot 4 seconden.
4. Draai de lens om en herhaal stap 2 en 3.
5. SPOEL beide kanten van de lens gedurende 5 seconden met verse vloeistof. Plaats de lenzen in een schone lenshouder en vul deze met vloeistof. Sluit de lenshouder stevig.
6. WEEK de lenzen minimaal 6 uur om ze te desinfecteren, reinigen en eiwitanslag te verwijderen.

#### Desinfectievloeistof:

- Leg de lenzen in de juiste kant van de lenshouder (blauw voor links - wit voor rechts).
- Vul beide kanten met verse ACUVUE™ RevitaLens desinfecterende all-in-one contactlensvloeistof. Plaats de deksels weer op de lenshouder en laat gedurende ten minste 6 uur weken voor desinfectie en verwijdering van eiwitten en lipiden.

Uw lenzen zijn nu klaar om gedragen te worden. Spoel de lenshouder af met ACUVUE™ RevitaLens desinfecterende all-in-one contactlensvloeistof en laat het ondersteboven aan de lucht drogen op een schone handdoek.

**Let op:** U mag uw lenzen in de ongeopende lenshouder maximaal 30 dagen onafgebroken in ACUVUE™ RevitaLens desinfecterende all-in-one contactlensvloeistof laten zitten. Na 30 dagen moet het reinigen en desinfecteren worden herhaald voordat u uw lenzen indooft.

#### VERWIJDERING VAN EIWITTEN VAN UW CONTACTLENZEN

ACUVUE™ RevitaLens desinfecterende all-in-one contactlensvloeistof verwijdert eiwitten terwijl uw lenzen in de lenshouder weken. Dagelijks gebruik van ACUVUE™ RevitaLens desinfecterende all-in-one contactlensvloeistof maakt voor veel lensdragers een aparte enzymatische reiniger overbodig: raadpleeg uw oogzorgspecialist.

#### WAARSCHUWINGEN:

**Alle instructies moeten worden opgevolgd. Indien dit niet gebeurt, kan dit leiden tot ernstige ooginfectie of letsel. Als er oogirritatie optreedt, stop dan onmiddellijk met het dragen van de lenzen en neem contact op met uw oogzorgspecialist.**

Spuut de ACUVUE™ RevitaLens desinfecterende all-in-one contactlensvloeistof niet rechtstreeks van de fles in uw oog.

#### VOORZORGSMAATREGELEN:

- Algemeen:** Gebruik de ACUVUE™ RevitaLens desinfecterende all-in-one contactlensvloeistof met zachte contactlenzen, inclusief lenzen van siliconenhydrogel. Niet gebruiken met harde lenzen (vormstabiele gasdoorlatende lenzen, RGP).  
 Gebruik geen ander contactlens-verzorgingssysteem zonder uw oogzorgspecialist om advies te vragen.  
 Niet gebruiken als u allergisch bent voor één van de bestanddelen.  
 Boraten (borzuur en natriumboraat) worden in een concentratie boven 0,1% gewicht per gewicht als CMR 1B-stoffen gedefinieerd en zijn veilig als het product conform de instructies op het etiket wordt gebruikt.  
 Problemen met contactlenzen en lensverzorgingsproducten kunnen leiden tot infectie van het hoornvlies en/of zweren en tot verlies van het gezichtsvermogen. Het is van essentieel belang dat u de aanwijzingen van uw oogzorgspecialist en alle instructies op het etiket opvolgt voor het juiste gebruik van lenzen en lensverzorgingsproducten, inclusief de lenshouder.  
 Draag uw lenzen niet langer dan voorgeschreven.  
 Gooi beschadigde of uitgedroogde lenzen weg.  
 Vermijd het gebruik van spuitbussen bij het dragen van contactlenzen.  
 Ga regelmatig op controle bij uw oogzorgspecialist.  
 Buiten het bereik van kinderen houden.
- Gebruik:** Gebruik ACUVUE™ RevitaLens desinfecterende all-in-one contactlensvloeistof altijd met de niet-steriele lenshouder die in de verpakking wordt meegeleverd.  
 Niet gebruiken wanneer de veiligheidsverzegeling ontbreekt of wanneer deze verbroken is.  
 Hergebruik de vloeistof niet; gebruik altijd verse vloeistof.  
 De fles onmiddellijk na gebruik goed sluiten.  
 Wrijf uw lenzen altijd handmatig gedurende ten minste 2-4 seconden met de contactlensvloeistof voordat u ze weekt.  
 Niet zwemmen, douchen en geen bad nemen terwijl u contactlenzen draagt.  
 Geen speeksel gebruiken en uw lenzen niet in uw mond nemen om ze opnieuw te bevochtigen.  
 Om verontreiniging te voorkomen, mag de punt van de fles geen enkel oppervlak raken en mag deze niet in contact komen met het oog.  
 De contactlensvloeistof niet inslikken. Raadpleeg indien nodig een arts bij onbedoelde inname.  
 Spoel uw lenzen/lenshouder niet af en/of bewaar lenzen niet in water of in een niet-steriele vloeistof.
- Bewaren:** Bewaren tussen 5 °C tot 25 °C.

#### Weggoien en vervalddatum:

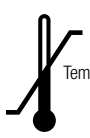
Gebruiken vóór de vervaldatum op het etiket en de doos. Niet gebruiken na de vervaldatum.  
 Resterende contactlensvloeistof 90 dagen nadat u de fles voor het eerst geopend hebt, weggooien.  
 Resterende contactlensvloeistof in uw lenshouder weggooien voordat u uw lenzen opnieuw desinfecteert.  
 Gooi altijd uw oude lenshouder weg en gebruik de nieuwe meegeleverde lenshouder.  
 Voer alle gebruikte producten af volgens de lokale vereisten.

**Ingrediënten:** Alexidine 0,00016%, polyquaternium-1 0,0003%, boorzuur, natriumboraat-decahydraat, TETRONIC 904, ethyleendiaminetetra-azijnzuur (EDTA), trinitriumcitraatdihydraat, natriumchloride en gezuiverd water.

#### MELDING VAN BIJWERKINGEN:

Elk incident dat zich voordoet tijdens het dragen van dit product moet worden gemeld aan de fabrikant en/of de geautoriseerde vertegenwoordigende en/of de nationale autoriteit.

## Symbolen

|                                                                                     |                                                                |                                                                                     |                                                |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | Raadpleeg de gebruiksaanwijzing                                |  | Fabrikant                                      |  | Productiedatum                                                                    |  | Lotnummer                                                                                       |  | Vervaldatum       |
|  | Gesteriliseerd met behulp van aseptische verwerkingstechnieken |  | Systeem met een enkelvoudige steriele barrière |  | Medisch hulpmiddel                                                                |  | Catalogusnummer                                                                                 |  | Temperatuurlimiet |
|  | Let op                                                         |  | Bevat schadelijke stoffen                      |  | Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd en raadpleeg de gebruiksaanwijzing |    | Resterende contactlensvloeistof 90 dagen nadat u de fles voor het eerst geopend hebt, weggooien |                                                                                       |                   |