

GEBRUIKSAANWIJZING

DEZE FOLDER BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR CONSUMENTEN EN OOGZORGSPCIALISTEN* OVER HET GEBRUIK EN DE VEILIGHEID VAN HET PRODUCT. LEES DEZE AANDACHTIG EN BEWAAR DE FOLDER ZODAT U HEM LATER NOG KAN RAADPLEGEN. CONTACTLENZEN DIENEN ALTIJD TE WORDEN Aangepast DOOR EEN OOGZORGSPCIALIST. HET IS BELANGRIJK DE AANWIJZINGEN VAN DE OOGZORGSPCIALIST EN ALLE INSTRUCTIES OP DE VERPAKKING OP TE VOLGEN VOOR EEN CORRECT GEBRUIK VAN UW CONTACTLENZEN.
*Informeert welke beroepsbeoefenaars in uw land contactlenzen mogen aanpassen.

PRODUCTIDENTIFICATIE (Naam)

PRECISION1™ (verofilcon A) daglenzen
PRECISION1™ for Astigmatism (verofilcon A) daglenzen
Met UV-blokkerende technologie

PRODUCTBESCHRIJVING

Het lensmateriaal bestaat voor ongeveer 51% uit water en voor 49% uit verofilcon A, een silicone bevattende hydrogel. Het kleurendadditief Reactive Blue 247 wordt aan het lensmateriaal toegevoegd om een lichtblauwe kleur van rand tot rand te creëren (handling tint) zodat de lenzen gemakkelijker te zien zijn bij het hanteren. Bovendien bevatten de lenzen een additief (benzotriazool UV-absorberend monomeer) om UV-straling te blokkeren. De transmissiekenmerken zijn minder dan 1% in het UVB-bereik van 280 nm tot 315 nm en minder dan 10% in het UVA-bereik van 316 tot 380 nm voor het hele sterktebereik.

TECHNISCHE PRESTATIEKENMERKEN

Lenseigenschappen

- Brekingsindex (gehydrateerd): 1,4
- Lichttransmissie: > 90% (@ 640 nm, -3,00 D)
- Zuurstofdoorlaatbaarheid (Dk): 90×10^{-11} (cm²/sec) (ml O₂/ml x mm Hg), gemeten bij 35 °C (intrinsieke Dk - Coulometrische methode) 51% bij gewicht in normale zoutoplossing
- Watergehalte: ≥ 80%
- Gehalte oppervlaktewater: ≥ 80%

Beschikbare lensparameters#

#Opmerking: de beschikbaarheid van producten en parameters kan per land verschillend zijn.

PRECISION1™ (verofilcon A) contactlenzen (sferisch)

- Diameter: 14,2 mm
- Centrale dikte: 0,09 mm @ -3,00 D (varieert met de sterkte)
- Basiscurve en sterkte:
 - Basiscurve: 8,3 mm
 - Min sterkte: -0,50 D tot -6,00 D (per 0,25 D)
 - Plus sterkte: +0,50 D tot +6,00 D (per 0,25 D)
- Basiscurve: 8,7 mm
 - Min sterkte: -0,50 D tot -6,00 D (per 0,25 D)

PRECISION1™ for Astigmatism (verofilcon A) contactlenzen (torisch)

- Diameter: 14,5 mm
- Centrale dikte: 0,10 mm @ -3,00 D (varieert met de sterkte)
- Basiscurve: 8,5 mm
- Sterkte en as:

Sferisch	Cilinder	As
+0,25 tot +4,00 D (per 0,25 D)	-0,75 D, -1,25 D, -1,75 D -2,25 D	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° 10°, 20°, 160°, 170°, 180°
Plano tot -6,00 D (per 0,25 D)	-0,75 D, -1,25 D, -1,75 D -2,25 D	10° to 180° (per 10°) 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
-6,50 tot -8,00 D (per 0,50 D)	-0,75 D, -1,25 D, -1,75 D -2,25 D	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° 10°, 20°, 160°, 170°, 180°

BEOOGD DOEL / GEBRUIK

PRECISION1™ en **PRECISION1™ for Astigmatism** (verofilcon A) zachte contactlenzen werken als een brekingsmedium om lichtstralen op het netvlies te bundelen en zo het gezichtsvermogen te corrigeren.

DOELGROEPEN

De beoogde dragerpopulatie voor **PRECISION1™** (verofilcon A) sferische zachte contactlenzen omvat personen van 7 jaar en ouder met gezonde ogen die zichtcorrectie (myopie of hyperopie) nodig hebben, bij wie de lens goed aangepast kan worden en die in staat zijn de gebruiksaanwijzing voor het dragen, verzorgen en veiligheid op te volgen (of die een zorgverlener hebben die in hun plaats kan handelen). De beoogde dragerpopulatie voor **PRECISION1™ for Astigmatism** (verofilcon A) torische zachte contactlenzen omvat personen van 7 jaar en ouder met gezonde ogen die zichtcorrectie (myopie of hyperopie, met astigmatisme) nodig hebben, bij wie de lens goed aangepast kan worden en die in staat zijn de gebruiksaanwijzing voor het dragen, verzorgen en veiligheid op te volgen (of die een zorgverlener hebben die in hun plaats kan handelen).

KLINISCHE VOORDELEN

PRECISION1™ (verofilcon A) sferische zachte contactlenzen verbeteren de gezichtsscherpte bij personen met myopie of hyperopie.
PRECISION1™ for Astigmatism (verofilcon A) torische zachte contactlenzen verbeteren de gezichtsscherpte bij personen met myopie of hyperopie, met astigmatisme.

INDICATIES (Gebruik)

PRECISION1™ (verofilcon A) sferische zachte contactlenzen zijn geïndiceerd voor de optische correctie van ametropie (myopie of hyperopie) bij personen met gezonde ogen met minimaal astigmatisme dat niet storend is voor de gezichtsscherpte.

PRECISION1™ for Astigmatism (verofilcon A) torische zachte contactlenzen zijn geïndiceerd voor de optische correctie van ametropie (myopie of hyperopie, met astigmatisme) bij personen met gezonde ogen.

DRAAG- EN VERVANGINGSSCHEMA

Verofilcon A zachte contactlenzen zijn voor éénmalig gebruik en voor overdag dragen (minder dan 24 uur tijdens het wakker zijn).

CONTRA-INDICATIES (Redenen om niet te gebruiken)

Contactlenzen mogen niet worden gedragen in combinatie met bepaalde gezondheids- of omgevingsfactoren. Factoren die het veilig dragen van contactlenzen kunnen belemmeren of verstoren, zijn:

- Allergie, ontsteking, infectie of irritatie in of rond de ogen of oogleden
- Onvoldoende traanfilm (droge ogen)
- Hypo-esthesie van het hoornvlies (verminderde gevoeligheid van het hoornvlies)
- Het gebruik van bepaalde geneesmiddelen die gecontra-indiceerd zijn of die het dragen van contactlenzen verstoren, inclusief oogmedicatie
- Elke systemische ziekte die kan verergeren door of het veilig dragen van contactlenzen verstoort.
- Als de ogen rood of geïrriteerd worden

Raadpleeg een oogzorgspecialist specifiek over deze of andere aandoeningen.

WAARSCHUWINGEN

- Daglenzen zijn niet bedoeld om 's nachts te dragen. Verofilcon A lenzen mogen niet worden gedragen tijdens het slapen.
- Ernstige oogproblemen, inclusief hoornvliesontstekingen (ulceratieve keratitis), kunnen snel ontwikkelen en leiden tot verlies van gezichtsvermogen.
- Het dragen van contactlenzen verhoogt het risico op ooginfecties. Slapen met de lenzen in of roken verhoogt het risico op ulceratieve keratitis bij contactlensdragers.^{1,2}
- Als een lensdrager ongemak in het oog, een gevoel van een vreemd voorwerp, overmatig tranen, veranderingen in zicht of roodheid van het oog ervaart, moet hij/zij worden geïnstrueerd de lenzen onmiddellijk uit te nemen en direct contact op te nemen met een oogzorgspecialist.
- Problemen met contactlenzen en lensverzorgingsproducten kunnen leiden tot ernstig oogletsel. Het is belangrijk de aanwijzingen van de oogzorgspecialist en alle instructies op het etiket voor een correct gebruik van lenzen en lensverzorgingsproducten op te volgen.
- UV-absorberende contactlenzen zijn GEEN vervanging voor beschermende UV-absorberende brillen of zonnembrillen. UV-absorberende brillen moeten blijven gebruikt worden zoals aanbevolen.
- De effectiviteit van het dragen van UV-absorberende contactlenzen bij het voorkomen of verminderen van oogaandoeningen die samenhangen met blootstelling aan UV-licht is op dit moment niet vastgesteld.

VOORZORGSMAATREGELLEN

Speciale Voorzorgsmaatregelen voor de oogzorgspecialist

- Bij het selecteren van een geschikt lenstype en parameter moet de oogzorgspecialist rekening houden met alle lenseigenschappen die de lensprestatie en de ooggezondheid kunnen beïnvloeden, zoals zuurstofdoorlaatbaarheid, centrale en perifere dikte en diameter van de optische zone.

- Proeflenzen voor aanpas- en diagnosedoeleinden moeten na éénmalig gebruik worden weggegooid en mogen niet van de ene persoon op de andere worden hergebruikt.
- De ooggezondheid van de lensdrager en de lensprestatie op het oog moeten bij de eerste afgifte zorgvuldig worden geëvalueerd en voortdurend worden gecontroleerd door de oogzorgspecialist.
- Fluoresceïne, een gele kleurstof, mag niet worden gebruikt terwijl de lenzen zich op het oog bevinden. De lenzen absorberen deze kleurstof en verkleuren.
- Diabetici kunnen een verminderde gevoeligheid van het hoornvlies hebben en zijn dus vatbaarder voor hoornvliesletsel en genezen niet zo vlug of volledig als niet-diabetici.
- Veranderingen in zicht of veranderingen in lensolerantie kunnen optreden tijdens de zwangerschap, borstvoeding of het gebruik van orale contraceptiva. Deze personen moeten nauwlettend gecontroleerd worden op zicht, comfort of andere oculaire veranderingen.
- Oogzorgspecialisten moeten lensdragers instrueren hun lenzen onmiddellijk uit te nemen als het oog rood of geïrriteerd wordt.
- Personen moeten voordat ze de praktijk van de oogzorgspecialist verlaten, in staat zijn hun lenzen onmiddellijk uit te nemen of moet er iemand anders beschikbaar zijn die de lenzen voor hen kan uitnemen.
- Routine oogonderzoeken zijn noodzakelijk om de voortdurende ooggezondheid van de persoon te verzekeren. Alcon raadt lensdragers aan om een oogzorgspecialist minstens één keer per jaar te bezoeken, of vaker zoals aanbevolen door de oogzorgspecialist.

Voorzorgsmaatregelen voor het hanteren en dragen van lenzen

- Controleer dagelijks uw ogen om zeker te zijn dat ze er goed uitzien, comfortabel aanvoelen en dat uw zicht helder is.
- Niet gebruiken als de blisterverpakking beschadigd is of niet volledig verzegeld is. Dit kan productbesmetting veroorzaken, wat kan leiden tot een ernstige ooginfectie.
- Als de gebruiker een blisterverpakking per ongeluk opent voordat de lens bedoeld is voor gebruik, moet de lens worden weggegooid. Dit kan productbesmetting veroorzaken en leiden tot een ernstige ooginfectie.
- In het belang van het behoud van de gezondheid en veiligheid van uw ogen, dient het draagschema van de lenzen te worden bepaald door een oogzorgspecialist.
- De lenzen zijn niet bedoeld om gereinigd of gedesinfecteerd te worden en moeten na éénmalig gebruik worden weggegooid. Bij hergebruik voldoet het product niet meer aan de gewenste kwaliteit en verhoogt het risico op oogirritatie en -infectie.
- Laat uw contactlenzen nooit door iemand anders dragen, dit kan micro-organismen verspreiden, wat tot ernstige ooggezondheidsproblemen zou kunnen leiden.
- Laat contactlenzen nooit in contact komen met niet-steriele vloeistoffen, (inclusief leidingwater en speeksel) aangezien microbiële besmetting kan optreden, wat kan leiden tot permanente oogbeschadiging.
- Raadpleeg een oogzorgspecialist voordat u uw lenzen draagt tijdens sportactiviteiten zoals zwemmen en andere watergerelateerde activiteiten. Blootstelling aan water (inclusief leidingwater of andere niet-steriele vloeistoffen) tijdens het dragen van contactlenzen bij activiteiten zoals douchen, zwemmen, waterskiën en het gebruik van bubbeldalen kan het risico op ooginfecties verhogen, waaronder Acanthamoeba keratitis.
- Verwijder de lenzen en gooi ze weg wanneer ze worden blootgesteld aan schadelijke of irriterende dampen.
- Gooi een lens weg die uitgedroogd of beschadigd is. Vervang deze door een verse nieuwe lens.
- Het is aanbevolen dat contactlensdragers hun oogzorgspecialist minstens één keer per jaar bezoeken, of vaker zoals aangeraden door de oogzorgspecialist.
- Informeert uw werkgever dat u contactlenzen draagt, vooral als u voor uw werk oogbeschermingsmiddelen moet gebruiken.
- Noteer de juiste lenssterkte voor elk oog. Alvorens de lens in te brengen, controleer of de lenssterkte op iedere blisterverpakking overeenstemt met de benodigde sterkte voor dat oog.
- Verander niet van lenstype of parameter zonder eerst een oogzorgspecialist te raadplegen.
- Als het dragen van contactlenzen voor langere tijd wordt onderbroken, dient u de oogzorgspecialist te raadplegen voordat u het dragen hervat.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van zeep, lotions, crèmes, cosmetica of deodoranten aangezien deze irritatie kunnen veroorzaken als ze in contact komen met uw lenzen.
- Breng uw lenzen aan voordat u make-up aanbrengt en neem ze uit voordat u de make-up verwijdert.
- Draag altijd reserve lenzen bij u of zorg ervoor dat u een reserve bril ter beschikking hebt.
- Gebruik lenzen niet na de vervaldatum.

ONGEWENSTE BIJWERKINGEN (Mogelijke problemen)

Problemen kunnen optreden bij het dragen van contactlenzen en kunnen zich eerst voordoen als een of meer van de volgende tekenen en symptomen:

- Roodheid van het oog
- Oculair ongemak
- Brandende en prikkende ogen
- Gevoel van droogheid van de ogen
- Wazig zien
- Visuele stoornis
- Fotofobie (lichtgevoeligheid)
- Irritatie
- Pijn
- Hoofdpijn
- Ontsteking

Deze tekenen en symptomen kunnen verband houden met meerdere aandoeningen, waaronder:

- Verminderd zicht (tijdelijk of permanent)
- Abrasie van het hoornvlies
- Hoornvliesoedeem
- Microbiële infectie
- Ulceratieve keratitis (hoornvliesontsteking), niet-besmettelijk
- Allergische reactie / overgevoeligheid
- Toxische reactie

Indien deze tekenen, symptomen en aandoeningen worden genegeerd, kunnen deze leiden tot ernstigere complicaties.

WAT TE DOEN INDIEN ZICH EEN PROBLEEM VOORDOET

Als een van bovengenoemde ongewenste bijwerkingen zich voordoet, neem de lens (lenzen) onmiddellijk uit:

- Controleer het (de) aangetaste oog (ogen) in een spiegel en zoek naar tekenen van onregelmatigheid.
 - Als het ongemak of probleem stopt, breng een verse nieuwe lens in.
 - Als het ongemak of probleem niet stopt of als het terugkomt na het aanbrengen van een nieuwe lens (lenzen), verwijder de lens (lenzen) en neem onmiddellijk contact op met uw oogzorgspecialist.

Er kan sprake zijn van een ernstige aandoening zoals een infectie, hoornvliesontsteking (ulceratieve keratitis) of iritis. Deze aandoeningen kunnen snel erger worden en kunnen tot een permanent verlies van het gezichtsvermogen leiden. Minder ernstige reacties zoals abrasie, verkleuren van het epitheel en bacteriële conjunctivitis moeten correct worden behandeld om complicaties te voorkomen.

- Occasionele droogheid kan verlicht worden door meerdere keren volledig te knippen of door het gebruik van bevochtigingsdruppels die goedgekeurd zijn voor het gebruik met zachte contactlenzen. Raadpleeg een oogzorgspecialist als de droogheid aanhoudt.
- Als een lens vastplakt (niet meer beweegt), breng enkele bevochtigingsdruppels aan en wacht tot de lens vrij begint te bewegen op het oog. Als het probleem aanhoudt, raadpleeg een oogzorgspecialist.
- Als een lens op het oog verschuift, kan deze terug in de centrale positie worden gebracht door:
 - Uw oogleden te sluiten en de lens voorzichtig op zijn plaats te masseren, of
 - In de richting van de lens te kijken en zachtjes te knippen, of
 - Voorzichtig de verschoven lens op het hoornvlies te duwen met een lichte vingerdruk op de rand van het bovenste of onderste ooglid.
- Als een lens in uw oog scheurt, verwijder voorzichtig de stukjes door ze samen te knijpen zoals u normaal doet bij het uittrekken van een lens. Als de lensstukjes niet gemakkelijk lijken te verwijderen, knijp dan niet in het oogweefsel. Spoel met een steriele zoutoplossing en probeer nogmaals om de lensstukjes te verwijderen. Als dit niet helpt, neem contact op met uw oogzorgspecialist voor hulp.

Algemene noodgevallen:

Als chemicaliën van welke aard dan ook (huishoudelijke producten, vloeistoffen voor de tuin, laboratoriumchemicaliën, enz.) in de ogen worden gespat:

- Spoel de ogen onmiddellijk met een zoutoplossing of leidingwater.
- Nem de lenzen uit, gooi ze weg en neem onmiddellijk contact op met uw oogzorgspecialist of ga meteen naar de spoedafdeling van een ziekenhuis.

MELDEN VAN ERNSTIGE INCIDENTEN

Elk ernstig incident gerelateerd aan het gebruik van dit medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan Alcon Laboratories, Inc.:

Neem contact op met uw lokaal Alcon kantoor of uw Alcon distributeur
Email: ga.complaints@alcon.com

Ernstige incidenten moeten ook worden gemeld aan de bevoegde autoriteit voor medische hulpmiddelen van uw land.

GEBRUIKSAANWIJZING

Begin elke dag met een nieuw paar lenzen die aan het einde van elke dagelijkse draagperiode worden weggegooid.

RICHTLIJNEN VOOR HET AANPASSEN VOOR OOGZORGSPCIALISTEN

De ooggezondheid en de refractieve eigenschappen die nodig zijn om met succes verofilcon A zachte contactlenzen bij een persoon aan te passen, zijn vergelijkbaar met die voor het aanpassen van andere zachte contactlenzen. Er moet een grondig vooronderzoek worden uitgevoerd om er zeker van te zijn dat de persoon een geschikte kandidaat

is voor het dragen van zachte contactlenzen. Voor aanvullende informatie is een uitgebreide aanpasgids beschikbaar op www.ifu.alcon.com.

INSTRUCTIES VOOR HET HANTEREN VAN DE LENS

- Was en spoel de handen altijd grondig en droog ze volledig af met een schone, pluisvrije handdoek voordat u de contactlenzen aanraakt.
- Schud de blisterverpakking zachtjes voor het openen.
- Neem de lens uit de blisterverpakking door deze voorzichtig op uw handpalm te gieten.
- Let erop dat de lens niet binnenstebuiten zit en dat u de juiste lens voor elk oog heeft.
- Controleer de lenzen voordat u ze aanbrengt.
- De lenzen niet aanbrengen als ze beschadigd of vuil zijn.

INSTRUCTIES VOOR HET AANBRENGEN VAN DE LENS

- Controleer voordat u lenzen aanbrengt altijd of de lenssterkte op elke blisterverpakking juist is voor elk oog en gebruik geen lens na de vervaldatum.
- Was en spoel uw handen grondig en droog ze volledig af met een schone, pluisvrije handdoek voordat u de contactlenzen aanraakt.
- Plaats een lens op het topje van uw schone en droge rechter- of linkerwijsvinger. Plaats de middelvinger van dezelfde hand dicht bij de onderste wimpers en trek het onderste ooglid naar beneden.
- Gebruik de vingers van uw andere hand om het bovenste ooglid naar boven te trekken.
- Plaats de lens direct op het oog (hoornvlies) en rol de vinger voorzichtig weg van de lens.
- Kijk naar beneden en laat het onderste ooglid langzaam los.
- Kijk recht voor u en laat het bovenste ooglid langzaam los.
- Knipper zachtjes met uw ogen.

INSTRUCTIES VOOR HET UITNEMEN VAN DE LENS

- Was en spoel je handen grondig en droog ze volledig af met een schone, pluisvrije handdoek.
- Knipper een paar keer volledig.
- Terwijl u omhoog kijkt, gebruikt u het topje van uw vinger om de lens naar beneden op het witte deel van het oog te schuiven.
- Verwijder de lens door zachtjes tussen duim en wijsvinger te knijpen. Knijp niet in het oogweefsel.
- Als de lens moeilijk te verwijderen is, droog uw vingers dan nogmaals en probeer het opnieuw. Gebruik in dit geval geen bevochtigingsdruppels.
- Gebruik nooit pincetten, zuignappen, scherpe voorwerpen of uw vingernagels om lenzen uit de lenshouder of uit uw ogen te halen.

Als u problemen ervaart bij het uitnemen van de lens (lens verschuift of is beschadigd), zie **WAT TE DOEN INDIEN ZICH EEN PROBLEEM VOORDOET** hierboven.

LENSVERZORGINGSVLOEISTOFFEN

Verofilcon A wegwerpbare daglenzen zijn niet bedoeld voor gebruik met een lensverzorgingssysteem. De lenzen zijn uitsluitend bedoeld voor éénmalig gebruik, dagelijks wegwerpbaar. Ze zijn niet bedoeld om gereinigd of gedesinfecteerd te worden en moeten na eenmalig gebruik worden weggegooid. Houd altijd vervangende lenzen of een reservebril bij de hand.

AFVAL EN RECYCLAGE

Gooi de contactlenzen en de folie van de blisterverpakking in de afvalbak, niet in de wastafel of het toilet. De kartonnen verpakking en het polypropyleen (PP) plastic omhulsel van de blisterverpakking moeten in de afvalbak worden gedeponeerd of worden gerecycled volgens de lokale richtlijnen voor afvalbeheer.

INHOUD VAN DE VERPAKKING (Hoe geleverd)

Elke lens is verpakt in een met folie verzegelde plastic blisterverpakking met fosfaatgebufferde zoutoplossing met ongeveer 0,3% polymere bevochtigingsmiddelen bestaande uit copolymeren van polyamidoamine en poly(acrylamide-acryl) zuur en is gesteriliseerd met stoom. Op de verpakking staat de basiscurve, diameter, dioptriesterkte, cilindersterkte en as (alleen torische lenzen), lotnummer van de fabrikant, productiedatum en vervaldatum. Lenzen worden steriel geleverd in kartonnen verpakkingen die tot 90 individueel verpakte contactlenzen kunnen bevatten.

AFKORTINGEN EN SYMBOLEN DIE KUNNEN GEBRUIKT WORDEN OP DE ETIKETTEN

AFKORTING / SYMBOOL	DEFINITIE
BC	Basiscurve
DIA	Diameter
PWR	Sterkte
D	Dioptrie (lenssterkte)
L	Links
R	Rechts
UV	Ultraviolet
UVA	Ultraviolet A
UVB	Ultraviolet B
CYL	Cilindersterkte
	Niet opnieuw gebruiken
	Batchcode
	Niet gebruiken na
EXP	Vervaldatum (Niet gebruiken na)
	Eén enkel steriel barrièresysteem
	Gesteriliseerd met stoom
	Europese conformiteit
	Engels (voorbeeld van twee lettercode voor de taal)
	Let op
	Raadpleeg de <i>gebruiksaanwijzing</i> of raadpleeg de elektronische <i>gebruiksaanwijzing</i>
	Niet gebruiken indien de blisterverpakking beschadigd is en raadpleeg de <i>gebruiksaanwijzing</i>
	Fabrikant
	Productiedatum
	Medisch hulpmiddel
	Unieke hulpmiddelenidentificatie
	SPOEL LENZEN NIET DOOR TOILET OF WASTAFEL
	Gemachtigde in de Europese Gemeenschap/Europese Unie
	Let op: de federale wetgeving (VS) beperkt de verkoop van dit hulpmiddel tot de verkoop door of in opdracht van een gediplomeerde oogzorgspecialist

Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, TX 76134-2099, USA

0123

Alcon Laboratories Belgium
Lichterveld 3
2870 Puurs-Sint-Amands, Belgium

Importeur:
CIBA VISION GmbH
Industriering 1
63868 Grosswallstadt
Germany

Gebruiksaanwijzingen voor contactlenzen zijn ook beschikbaar op de website: www.ifu.alcon.com.

Alcon

Datum van uitgave: 2024-09

900491480-0924

© 2024 Alcon Inc.

¹ Cutter GR, Chalmers RL, Roseman M. The Clinical Presentation, Prevalence, and Risk Factors of Focal Corneal Infiltrates in Soft Contact Lens Wearers. *The CLAO Journal*. Jan 1996; 22 (1): 30-37

² Schein OD, Glynn RJ, Poggio EC, Seddon JM, Kenyon KR. The Relative Risk of Ulcerative Keratitis Among Users of Daily-Wear and Extended-Wear Soft Contact Lenses. *N Eng J Med*. 1989; 321(12):773-83.



900491480-0924